

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku	INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU Z DRÓG ODDECHOWYCH DO BADANIA RSV.	Zał. – LM/PB-03/28
		1/1

Sposób postępowania

A. Materiały do badań:

- wydzielina nosowo-gardłowa (NSP) lub aspirat w ilości około 0,5 ml
- wymaz z nosa w wyjątkowej sytuacji - wg. Producenta testu nie daje gwarancji wykrycia wirusa w takim stopniu jak NPS
- nie należy pobierać do w/w badania płwociny

B. Przechowywanie NPS:

- powinna być badana niezwłocznie po pobraniu
- jeśli zachodzi konieczność przechowania, to : w temperaturze 2-8°C (lodówka) do 24 godzin w temperaturze (-20' C)-kilka dni

UWAGA: Wymaz z nosa powinien być badany w kierunku RSV niezwłocznie po pobraniu.

	Imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	data	podpis
Opracował:	Dr Ewa Namysł	Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego		